

メタフィルC

**【禁忌・禁止】

本材又はメタクリル酸エステル系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと(使用上の注意の項参照)。

【形状・構造及び原理等】

以下の構成成分があり、記載の成分を含有します。

構成成分	性状	組成
メタフィルC	ペースト	UDMA、TEGDMA、芳香族アミン、有機質含有シリカ、その他

【使用目的又は効果】

歯牙の窩洞の充填に用いる。

【使用方法等】

1) 操作手順(歯質への適用法)

①窩洞形成

通法に従って窩洞形成します。

②防湿、歯髄保護

窩洞形成後、防湿し、必要に応じて覆罩など適切な方法で歯髄保護を行います。

ただし、ユージノール系の覆罩材は使用しないでください。

③シェードの選択

窩洞の色調にあったシェードを選択します。

ビタシェード	A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、C3
補助色	DARK BROWN(ダークブラウン) ^{*1} INCISAL(インサイザル) ^{*2}

^{*1}高齢者の歯頸部や根面齲蝕の修復に用います。

^{*2}透明性が強く、切端部の充填や、他のシェードの上に重ねて充填し、象牙質+エナメル質といった、より自然感を出したい場合に用います。

④ボンディング処理

窩洞面に、ボンディング処理を行います。

ボンディング材は関連製品「AQボンドSP」をお勧めします。

使用にあたっては、その製品の「添付文書」に従って行ってください。

⑤充填

窩洞に充填し、形態を整えます。

2mm以上の窩洞には積層充填を行ってください。

⑥光重合

下記の条件で硬化させます。

各種照射器別での硬化深度 (単位: mm)

機種	ハロゲン系	高出力ハロゲン系	キセノン系	LED系
照射時間	30秒	5秒	10秒	3秒
A1、A2、A3、 A3.5、A4、 B2、B3、 C3、 INCISAL	2.5	2.5	3.0	2.5
DARK BROWN	2.0	2.0	2.5	2.0

⑦形態修正・研磨

通法に従って形態修正・研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 金属、陶材、レジンなどへ適用する時は、各々の被着面の前処理を適法により実施後、操作手順「④ボンディング処理」に換えて、レジンセメントを使用すること。レジンセメントは「スーパーボンド」をお勧めします。使用にあたっては、その製品の「添付文書」に従って行ってください。
- 2) 使用後はすぐに閉栓すること。

【使用上の注意】

** 1) 使用注意

- ①他の製品と混合して使用しないこと。
- ②本材の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。
- ③照射光は直視を避けて、遮光眼鏡等を使用すること。

④火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。

⑤使用中、水洗中に誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合は、うがいをして、必要に応じて医師の診断を受けさせること。

⑥硬化物が口腔粘膜に接触する場合には、その硬化物の表面を研磨し、滑らかな面とすること。

2) 重要な基本的注意

** ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

②本材又はメタクリル酸エステル系モノマーに対する過敏症の既往歴のある術者は、手袋等を用いて直接本材に触れないようにすること。また本材の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

③口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合は、すぐにアルコール綿などで拭いた後、多量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。

④使用するにあたっては、患者の個人差も考慮し、症例に適合するかどうかを判断して使用すること。

3) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・多湿、直射日光を避け、室温(1℃～30℃)にて保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔使用期間〕

本体に記載の使用期限*までに使用すること。

〔記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。〕

* (例) ☐○○○-△△は使用期限○○○年△△月を示す。)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者: サンメディカル株式会社

(本 社) 住 所: 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2

電話番号: 077-582-9980

フリーダイヤル: 0120-418-303 (FAX共通)

電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30

ホームページ: <http://www.sunmedical.co.jp>