


操作ステップ


バルクベースライナーII処理

ライナーリキッドのみで使用する場合

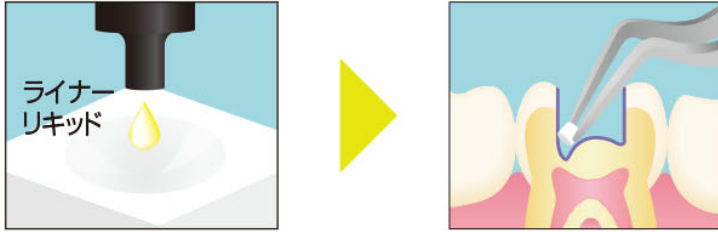

市販のアプリケーターでライナーリキッドを塗布

待ち時間
0秒

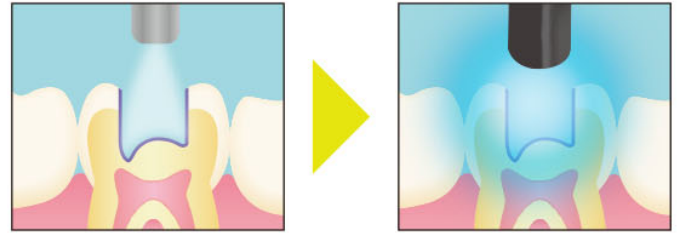


光照射

ゆるやかなエアード、塗布した液が動かなくなるまでエアブロー

機種	照射時間
LED	5秒

ブースターブラシを併用する場合

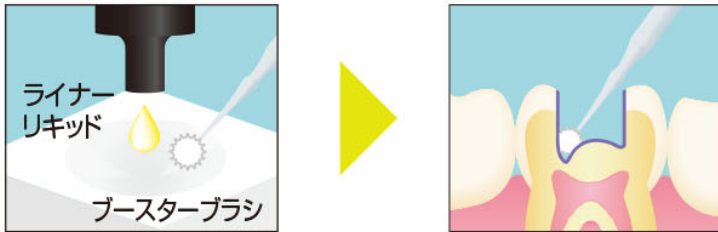


使用直前にブースターブラシでライナーリキッドを攪拌し、すみやかに混合液を塗布

ブースターブラシにはバイオアクティブモノマー[®]が担持されています。

バルクベースハードIIの充填・裏層

直接法 バルクベースハードIIで一括充填

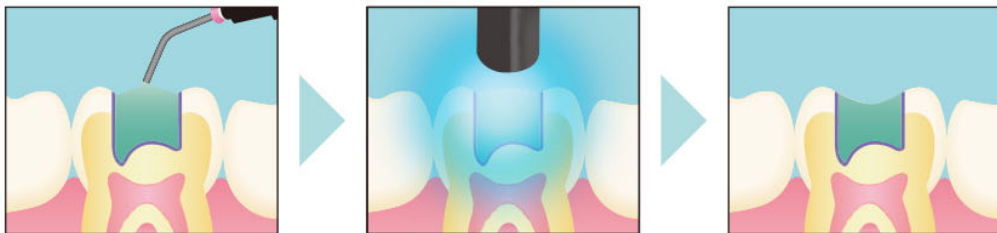


バルクベースハードIIを充填

光照射

仕上げ研磨・完成

機種	硬化深度	照射時間
LED	3mm	10秒
	4mm	20秒

間接法 バルクベースハードIIで裏層後インレー形成

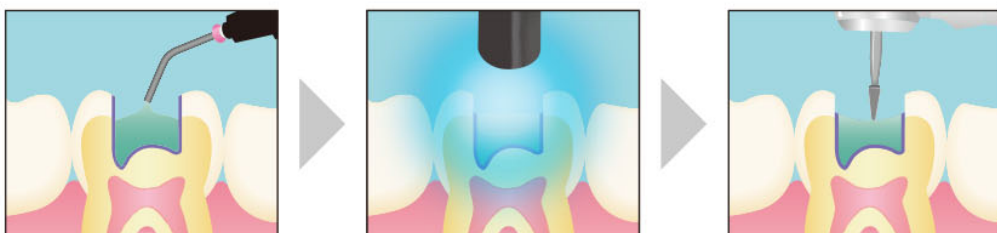

バルクベースハードIIで裏層

光照射

インレー形成

機種	硬化深度	照射時間
LED	3mm	10秒
	4mm	20秒

ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。