

歯科用注入器具

スーパーボンド マイクロシリンジ

 SUN MEDICAL



Super-Bond MICRO SYRINGE

スーパーボンド マイクロシリンジ



スーパーボンド マイクロシリンジ	
標準価格 ¥10,800	
■製品構成	
①シリンジベース	1本
②シリンジトップ	20本
【単品】	
■シリンジトップ 50本入り	¥2,750
■プランジャー	¥2,000

使用例



ポストホールへの注入



動揺歯固定での
隣接面への塗布




ブリッジ内冠への注入

各部の名称

シリンジトップ



シリンジベース

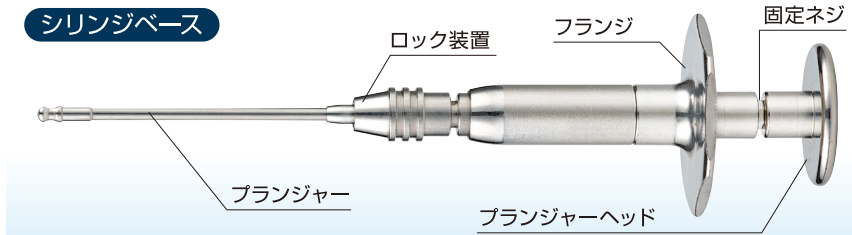

操作方法

準備

1 シリンジベースを垂直に立て、ロック装置を引き下げる。

処置
表面の使用例をご参照ください

2 ロック装置を引き下げたまま、シリンジトップをプランジャーの先端があたるまで差し込む。

使用後

3 ロック装置を放し、シリンジトップが外れないことを確認する。

準備

4 ダッペンの底面までシリンジトップの先端を挿入し、気泡を巻き込まないようにゆっくりとプランジャーを引いて混和泥を吸引する。

準備

1 使用後速やかにプランジャーを引く。この時、プランジャー先端に付着した混和泥がロック装置内部に入り込まないように注意する。

準備

2 ロック装置を引き下げる。

準備

3 ロック装置を引き下げたままシリンジトップを引き抜く。

準備

4 プランジャーの先端に付着した混和泥をアルコールガーゼなどで速やかに拭きとる。

使用上の注意

- 1 スーパーボンド マイクロシリンジはスーパーボンド及びスーパーボンド根充シーラー専用の器具です。使用にあたっては各製品の添付文書等をよくお読みください。
- 2 使用可能なポリマー粉末及び粉材は以下の通りです。その他のポリマー粉末は使用できません。

混和クリア

混和ティースカラー

混和ラジオベーク

シーラー粉材
- 3 シリンジトップは使用直前に装着してください。
- 4 混和泥調製後は速やかに吸引してください。なお、吸引可能時間*1は以下の表を目安にしてください。

	混和クリア 混和ティースカラー	混和ラジオベーク	シーラー粉材
吸引可能時間	1分*2以内	2分*2以内	3分*3以内
- 5 吸引した混和泥は速やかにご使用ください。
- 6 シリンジトップは再使用できません。使用後は必ず廃棄してください。
- 7 動作不良につながる恐れがあるため、プランジャー先端以外には混和泥を付着させないでください。
- 8 シリンジベースはオートクレーブ滅菌が可能です。
- 9 薬液で洗浄又は消毒する場合は、使用する薬剤の「使用上の注意」を確認してから使用してください。また、長時間の浸漬は避け、水洗及び乾燥を十分に行ってください。
- 10 プランジャーは取り外し交換が可能です。動きが悪い等の異常が認められた場合は交換してください。
- 11 落下させる等の衝撃を与えないでください。

*1: 混和泥を調製後、吸引できる時間。この時間までに吸引操作を終了してください。
 *2: 23℃環境下(室温が25℃を超える場合は冷却した環境下でご使用ください)。
 *3: 23℃環境下、冷却したダッペンディッシュ(S約8℃)を使用。

歯科用注入器具 スーパーボンド マイクロシリンジ (一般医療機器) 医療機器届出番号 25B2X00005000003
 歯科接着用レジセメント スーパーボンド (管理医療機器) 医療機器認証番号 221AABZK00115000
 歯科用根管充填シーラー スーパーボンド根充シーラー (管理医療機器) 医療機器承認番号 21400BZZ00187000

■製品仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年4月3日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本社/〒524-0044 滋賀県守山市古高町5-71-2 ☎077(582)9980

スーパーボンド マイクロシリンジの情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォンからのアクセスはコチラ→



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30