

Super MTA Paste

スーパーMTAペースト テクニカルガイド



スーパーMTAペーストを使いこなすための3つのポイント!

出過ぎた!規定量だけ押し出すには?

ペーストは柔らかいので、そっと押し出してください

スーパーMTAペーストのペーストは柔らかな性状です。 練和紙にペーストを押し出す際は、勢いよく押さずに、 目盛りを目視しながら、そっと押し出してください。



歯面に置けない!ピッタリ塗布するには?

適用部位はしっかり止血、乾燥してください

スーパーMTAペーストはレジン系覆髄剤です。 適用部位はしっかりと止血、乾燥(綿球、ペーパーポ イントによる吸湿 や バキュームチップによる吸引乾燥 など)させてから移送してください。



綿球による圧迫 止血と吸湿



バキュームチップ による吸引乾燥

硬化するまで何分待ったら修復できる?

移送後はすぐに修復処置に移ってください

スーパーMTAペーストの硬化時間は約24時間です。 感染防止のためにも、本材移送後は硬化を待たず、速やかに 修復処置(バルクベース、バルクベース ハード、スーパーボ ンド、ボンドフィルSB プラスなど)に移ってください。 なお、修復処置時のエアーブローは適用箇所に対して垂直に 弱圧でエアーブローしてください。



バルクベースで裏層



移送後すぐに歯面処理し 移送後すぐに歯面処理し スーパーボンドで裏層

夏層用高分子系材料 バルクベース (管理医療機器) 夏層用高分子系材料 バルクベース ハード (管理

■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。



スーパーMTAペーストの情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp サンメディカル





