

I T

ISTRUZIONI

IMPORTANTE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE QUESTO FOGLIETTO E FARE RIFERIMENTO AD ESSO PERIODICAMENTE.

Cemento Dentale a Base di Resina Adesiva

Super-Bond Brush-dip Starter Kit

[SOLO PER USO DENTISTICO]

- Presentazione del prodotto**
Super-Bond Brush-dip Starter Kit è un cemento a base di resina adesiva autopolimerizzante, contiene 4-META*, MMA*, TBB* o PMMA* (resina 4-META/ MMA-TBB). Può essere utilizzato per cementare tutte le protesi dentali fisse fabbricate con una vasta gamma di materiali dentali.

*4-metacriloloisietil trimellitato anidride
*Metil metacrilato
*Tri-n-butilborano
*Poli metil metacrilato

Uso previsto:

Super-Bond Brush-dip Starter Kit aderisce allo smalto dentale, metallo, ceramica, zirconio e resina composta dopo un appropriato pretrattamento della superficie.

Indicazioni:
Super-Bond Brush-dip Starter Kit è indicato per:

- Applicazioni ortodontiche
- Fissaggio diretto dei denti mobili
- Ponte diretto
- Riparazione di protesi fratturate

Controindicazioni:
Pazienti con storie di gravi reazioni allergiche a questo prodotto o ai monomeri metacrilici e all'acetone.

Effetti secondari:
In rari casi, i componenti di Super-Bond Brush-dip Starter Kit possono condurre alla sensibilizzazione. In tali casi Super-Bond Brush-dip Starter Kit non dovrebbe essere più usato.

2. Componenti

Super-Bond Brush-dip Starter Kit* ----- Class IIa 

[Class IIa ]	
Componenti	Quantitativo nei kit
① Super-Bond Brush-dip Initiator	1 x 0,3 mL
② Super-Bond Brush-dip Monomer	1 x 3,5 mL
③ Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear)	1 x 1,5 g
④ Enamel Etchant Gel	1 x 1 mL

[Class I ]	
Accessori	Quantitativo nei kit
⑤ Dispensing Stand	1
⑥ Dispensing Cups	20
⑦ Brush Handle (Bent)	1
⑧ Brush Tips (Brush-dip L)	20
⑨ 23G Needle Tip	5

■ Documenti allegati: Istruzioni, scheda di istruzioni illustrative, Precauzioni
*I componenti del kit possono essere acquistati singolarmente.

3. Composizioni

- Super-Bond Brush-dip Initiator: Tri-n-butilborano parzialmente ossidato, Altro.
- Super-Bond Brush-dip Monomer: Monomeri di metacrilato, Altro.
- Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear): Poli metil metacrilato, Altro.
- Enamel Etchant Gel: Acido tiosulfonico, Acqua, Addensante, Pigmento, Altro.

Componenti	Forma
①	Liquido trasparente incolore
②	Liquido trasparente giallo pallido incolore
③	Polvere bianca
④	Gel rosso

4. Precauzioni

4.1 Avvertenze di sicurezza

- Super-Bond Brush-dip Starter Kit ha come componenti sostanze come i monomeri metacrilati, che possono causare reazioni allergiche. Non vanno usati su pazienti allergici all'acetone, sensibili agli acrilati, alla formaldeide, all'isopropilalcol, a resine non polimerizzate può causare irritazione, dermatite o reazioni infiammatorie al tessuto (pelle, mucosa, occhi, ecc.) degli individui sensibili. In tal caso interrompere l'uso, lavare la parte con abbondanti quantità d'acqua e consultare un medico se necessario.
- Evitare che i componenti di Super-Bond Brush-dip Starter Kit entrino in contatto con tessuti molli, pelle od occhi. La parte contaminata deve essere pulita immediatamente con alcool e poi risciacquata accuratamente con abbondanti quantità d'acqua corrente. Se i componenti entrano negli occhi, risciacquare immediatamente con abbondanti quantità d'acqua corrente e far visitare il paziente da un oftalmologo.
- Evitare l'ingestione accidentale di componenti di Super-Bond Brush-dip Starter Kit durante l'applicazione e il risciacquo. In caso di ingestione, consultare un medico se necessario.
- Maneggiare i componenti di Super-Bond Brush-dip Starter Kit in un'area ben ventilata (ventilare l'area più volte in un'ora). In caso di inalazione del vapore, uscire all'aperto.
- Super-Bond Brush-dip Initiator e Super-Bond Brush-dip Monomer sono altamente volatili e infiammabili. Non conservarli dove possono essere esposti a fiamme libere.

4.2 Precauzioni comuni

- Si raccomanda l'uso di una diga di gomma.
- dentisti devono indossare guanti dentali.
- Non mescolare i componenti con quelli di altri materiali.
- Utilizzare questo prodotto solo per le applicazioni consigliate in queste istruzioni.

4.3 Precauzioni nella manipolazione

- Una superficie contaminata da olio, sangue, saliva e biofilm abbassa la forza del legame. Pulire accuratamente il dente e le protesi. Dopo la pulizia, fare attenzione a evitare la ricontaminazione isolando adeguatamente la superficie. L'uso della diga di gomma è altamente raccomandato.
- Fluorare o olio abbassa la forza del legame. Una pasta dentale contenente fluoruro o olio non va utilizzata per la pulizia della superficie dei denti.
- L'eugenolo è un inibitore della polimerizzazione. Pertanto basi e cementi contenenti eugenolo non vanno utilizzati con i componenti del Super-Bond Brush-dip Starter Kit.
- L'ipoclorito di sodio è un inibitore della polimerizzazione. Quando si utilizza Super-Bond Brush-dip Starter Kit sulla superficie dentinale trattata con ipoclorito di sodio, Super-Bond C&B Green Activator o Dentin Etchant Gel vanno applicati dopo l'uso dell'ipoclorito di sodio. La durata del trattamento con ipoclorito di sodio deve essere limitata a meno di 15 secondi. Dettagli su come utilizzare Super-Bond C&B Green Activator e Dentin Etchant Gel sono disponibili nel documento allegato.
- Super-Bond Brush-dip Initiator e Super-Bond Brush-dip Monomer sono altamente volatili. Chiudere bene subito dopo l'uso.
- Il liquido attivato (miscela di Super-Bond Brush-dip Initiator e Super-Bond Brush-dip Monomer) si dissativa gradualmente. Utilizzarlo entro 5 minuti dopo la miscelazione.
- Super-Bond Brush-dip Starter Kit può scolorirsi se combinato con un cemento temporaneo contenente acido tannico.
- I componenti di Super-Bond Brush-dip Starter Kit sono soltanto monouso. Non rimettere i componenti erogatori nel contenitore originale. Smaltire correttamente il materiale residuo. Dopo aver usato Super-Bond Brush-dip Initiator con la tecnica Brush-dip, smaltire l'eventuale Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear) in eccesso rimasta nel piatto.
- Le Brush Tips e le Dispensing Cups sono monouso. Non riutilizzarle. Gettarle dopo ogni utilizzo.
- Quando una preparazione è profonda, vicina alla polpa, proteggere la polpa con materiale appropriato.
- Prima di usare gli accessori controllare che non siano fessurati, graffiati, scoloriti o in altro modo danneggiati, e in caso di anomalie non utilizzarli.

4.4 Precauzioni con Super-Bond Brush-dip Initiator

Se esposto all'aria o all'acqua, Super-Bond Brush-dip Initiator può perdere attività e generare calore. Attenersi a quanto segue.

- Condizioni di conservazione**
Evitare elevate temperature, alta umidità e la luce solare diretta. Il cambiamento ripetuto di temperatura può causare l'aspirazione d'aria nella siringa, riducendo così la durata di conservazione del Super-Bond Brush-dip Initiator.
"Dopo un tempo prolungato di conservazione, la prima goccia del Super-Bond Brush-dip Initiator può avere meno attività a causa dell'esposizione all'aria (ossigeno), anche se il resto del materiale nel contenitore rimane inalterato. Lo scarto di una goccia prima dell'uso garantirà la corretta reazione chimica."
"La siringa è di vetro, quindi deve essere maneggiata con attenzione per evitare urti, cadute e altri danni fisici.
- Dopo l'uso**
Giare la vita della siringa due volte in senso antiorario dopo ogni utilizzo per attenuare la pressione nel cilindro di Super-Bond Brush-dip Initiator. (La pressione accumulata può causare perdite del Super-Bond Brush-dip Initiator o in alcuni casi può anche rompere la siringa).
- Chiusura del tappo**
Il tappo si muove solo come aperto e chiuso. Richiudere la siringa subito dopo ogni utilizzo. L'aria dissiativa il Super-Bond Brush-dip Initiator. Non lasciare senza tappo.
- Pulizia della siringa**
Pulire la punta della siringa con una garza asciutta dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui. La garza utilizzata deve essere impregnata d'acqua e disattivare completamente Super-Bond Brush-dip Initiator prima dello smaltimento. L'accumulo del residuo può causare la chiusura del tappo in modo non corretto.
- Pulire immediatamente il Super-Bond Brush-dip Initiator sversato con salviette bagnate**
Se assorbito da un materiale combustibile, la temperatura può aumentare abbastanza da causare fumo. Il Super-Bond Brush-dip Initiator sversato o utilizzato deve essere immediatamente eliminato con una salvietta monouso UMIDA (non asciutta). Saturated poi accuratamente la salvietta in acqua corrente per disattivare il Super-Bond Brush-dip Initiator.
- Problema nell'erogazione del Super-Bond Brush-dip Initiator**
Se il Super-Bond Brush-dip Initiator non forma una goccia a causa dell'ostruzione dell'orificio o la vite non gira, non forzarlo. Il contenuto può schizzare se la siringa di vetro si rompe. Contattare il distributore.
- Altro**
In caso di qualunque inconveniente, contattare il distributore.

ES

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:
LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES UTILIZAR EL PRODUCTO.
CONSERVE ESTE FOLLETO Y CONSÚLTALO PERIÓDICAMENTE.

Cemento a base de resina adhesiva

Super-Bond Brush-dip Starter Kit

[SOLO PARA USO DEL DENTISTA]

- Descripción del Producto**
Super-Bond Brush-dip Starter Kit es un cemento de resina adhesiva de autocurado, que contiene 4-META*, MMA*, TBB* y PMMA* (resina de 4-META/ MMA-TBB). Se puede usar para cementar todas las prótesis dentales fijas fabricadas con una amplia gama de materiales dentales.

*Amidrido de trimellato de 4-metacrilolioxietilo
*Metacrilato de metilo
*Tri-n-butil borano
*Polimetilmetacrilato

Uso previsto:
Super-Bond Brush-dip Starter Kit se adhiere al esmalte dental, la dentina, el metal, la cerámica, el circonio y la resina compuesta con el tratamiento previo adecuado de la superficie.

Indicaciones:
Super-Bond Brush-dip Starter Kit está indicado para los siguientes:

- Aplicación de ortodoncia
- Fijación directa de dientes flojos
- Puente de unión directa
- Reparación de prótesis fracturadas

Contraindicaciones:
Pacientes que tienen antecedentes de reacciones alérgicas graves a este producto o monómeros de metacrilato y acetona.

Efectos secundarios:
En raras ocasiones, los componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit pueden causar sensibilización. En tales casos, ya no debe usarse Super-Bond Brush-dip Starter Kit.

2. Componentes

Super-Bond Brush-dip Starter Kit* ----- Class IIa 

[Class IIa ]	
Componentes	Cantidad o volumen en el Kit
① Super-Bond Brush-dip Initiator	1 x 0,3 mL
② Super-Bond Brush-dip Monomer	1 x 3,5 mL
③ Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear)	1 x 1,5 g
④ Enamel Etchant Gel	1 x 1 mL

[Class I ]	
Accesorios	Cantidad o volumen en el Kit
⑤ Dispensing Stand	1
⑥ Dispensing Cups	20
⑦ Brush Handle (Bent)	1
⑧ Brush Tips (Brush-dip L)	20
⑨ 23G Needle Tip	5

■ Documentos adjuntos: Instrucciones, Tarjetas de Instrucciones Pictóricas, Precauciones
*Componentes del kit se puede comprar de forma individual.

3. Composiciones

- Super-Bond Brush-dip Initiator: Tri-n-butil borano parzialmente ossidato y otros.
- Super-Bond Brush-dip Monomer: Monómeros de metacrilato y otros.
- Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear): Polimetilmetacrilato y otros.
- Enamel Etchant Gel: Ácido tiosulfónico, agua, espesante, pigmento y otros.

Componentes	Forma
①	Líquido transparente incoloro
②	Líquido transparente amarillo pálido incoloro
③	Póvo blanco
④	Gel rojo

4. Precauciones

4.1 Precauciones de seguridad

- Los componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit contienen sustancias, tales como monómeros de metacrilato, que pueden causar reacciones alérgicas. Por tanto, no son para uso en personas sensibles a los acrilatos, metacrilatos o metacrilatos similares. La exposición a resinas sin curar puede causar irritación, dermatitis o reacciones inflamatorias a los tejidos (piel, mucosa, ojos, etc.) de personas sensibles. Si este ocurre, suspenda el uso, enjuague el área con abundante agua y busque la atención médica, si es necesario.
- Evite el contacto de los componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit con tejidos blandos, piel u ojos. El área contaminada debe limpiarse inmediatamente con alcohol y luego enjuagarse bien con abundante agua corriente. Si estos componentes entran en ojo, enjuague inmedia y completamente el ojo con abundante agua corriente y haga que el paciente sea examinado por un oftalmólogo.
- Evite ingestión accidental durante la aplicación y el enjuague de los componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit. Si se ingiere, busque la atención médica, si es necesario.

Además, los componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit en un área bien ventilada (ventilar el área varias veces por hora). En caso de inhalación del vapor, moverse por aire fresco.

- Super-Bond Brush-dip Initiator y Super-Bond Brush-dip Monomer son altamente volátiles e inflamables. No almacene donde puedan estar expuestos a llama abierta.

4.2 Precauciones comunes

- Se recomienda el uso de dique de goma dental.
- Los dentistas deben usar guantes dentales.
- No mezcle los componentes con otros materiales.
- Utilice este producto solo para la aplicación recomendada en estas instrucciones.

4.3 Precauciones de manejo

- La superficie contaminada con aceite, sangre, saliva y biopeelculs disminuirá la fuerza de adhesión. Limpie bien el diente y la prótesis. Tras la limpieza, tenga cuidado de no volver a contaminar mediante el aislamiento adecuado de la superficie. Es muy recomendable usar un dique de goma.
- El fluor o la acide disminuirá la fuerza de adhesión. No debe usarse pasta dental que contenga el fluor o la acide para limpiar la superficie del diente.
- El eugenol es un inhibidor de polimerización. Por lo tanto, las bases y cementos que contienen eugenol no deben usar con componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit.
- El hipoclorito de sodio es un inhibidor de polimerización. Cuando usa Super-Bond Brush-dip Starter Kit en la superficie de la dentina tratada con hipoclorito de sodio, debe aplicar Super-Bond C&B Green Activator o Dentin Etchant Gel después de usar el hipoclorito de sodio. La duración de tratamiento con hipoclorito de sodio debe limitarse a menos de 15 segundos. Detalles sobre cómo usar Super-Bond C&B Green Activator y Dentin Etchant Gel se puede encontrar en el documento adjunto.
- Super-Bond Brush-dip Initiator y Super-Bond Brush-dip Monomer son altamente volátiles. Vuelva a taponar inmediatamente después de usar.
- El líquido Activado (mezcla de Super-Bond Brush-dip Initiator y Super-Bond Brush-dip Monomer) se desactiva gradualmente. Úselo en menos de 5 minutos después de mezclar.

- Super-Bond Brush-dip Starter Kit puede decolorarse si se combina con un cemento temporal que contenga ácido tánico.
- Los componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit son de un solo uso. No devuelve los componentes vertidos a su envase original. Deseche el material de sobra adecuadamente. Después de usar Super-Bond Brush-dip Starter Kit en la técnica de Brush-dip (cepillo), deseche todo el Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear) sobrante que queda en el recipiente.
- Brush Tips y Dispensing Cups son de un solo uso. No lo reutilice. Desechélo después de cada uso.
- Quando una preparación es profunda, cerca de la pulpa, proteger la pulpa dentaria con el material apropiado.
- Antes de usar los accesorios, revise daños, grietas, arañazos, descoloramiento, etc.; y deje de usarlo si hay alguna anomalía.

4.4 Precauciones en Super-Bond Brush-dip Initiator

Cuando se expone al aire o al agua, Super-Bond Brush-dip Initiator puede perder actividad y generar calor. Favor de cumplir con los puntos siguientes.

- Condiciones de almacenamiento**
Evite las altas temperaturas, la alta humedad y la luz solar directa. El cambio repetido de temperatura puede causar que la jeringa aspire aire, acortando así la vida útil de Super-Bond Brush-dip Initiator.
"Después de un almacenamiento prolongado, la primera gota del Super-Bond Brush-dip Initiator puede tener una actividad baja debido a la exposición al aire (oxígeno), aunque el resto del material en el envase no se ve afectado. Deseche una gota antes de usar, así garantizará la reacción química adecuada."
"La jeringa está hecha de vidrio, por lo tanto, debe manipularse con cuidado para evitar golpes, caídas y otros daños físicos.
- Después de su uso**
Gire el tornillo de la jeringa dos vueltas en sentido antihorario después de cada uso para aliviar la presión del barrel de Super-Bond Brush-dip Initiator. (La presión acumulada puede causar fuga del Super-Bond Brush-dip Initiator o en algunos casos romper la jeringa.)
- Cierre de tapa**
La tapa simplemente se desliza hacia dentro y fuera. Vuelva a tapar la jeringa inmediatamente después de cada uso. El aire desactiva el Super-Bond Brush-dip Initiator. No deje la jeringa sin tapar.
- Limpieza de jeringa**
Limpie la punta de la jeringa con una gasa seca después de cada uso para evitar la acumulación de residuos. La gasa para la limpieza debe estar saturada con agua para desactivar por completo el Super-Bond Brush-dip Initiator antes de desecharlo. La acumulación de residuos puede causar que el encaje de la tapa sea inadecuado.
- Limpiar inmediatamente Super-Bond Brush-dip Initiator derramado con toallas mojadas**
Si es absorbido por un material combustible, puede elevar la temperatura lo suficiente como para provocar una combustión libre. El Super-Bond Brush-dip Initiator vertido o no usado debe secarse inmediatamente con una toalla desechable MOJADA (no seca). Luego sature la toalla para desactivar el Super-Bond Brush-dip Initiator completamente en agua corriente.
- Problema al exprimir Super-Bond Brush-dip Initiator**
Si el Super-Bond Brush-dip Initiator no forma una gota debido al bloqueo en el orificio o al no poder girar el tornillo, no lo fuerce. El contenido puede salirpor si se rompe la jeringa de vidrio. Por favor contacte a su distribuidor.
- Otros**
Si hay algún inconveniente, póngase en contacto con su distribuidor.

5. Higien

- Brush Tips y Dispensing Cups son de un solo uso. No lo reutilice. Desechélo después de cada uso.
- Después de usar un mango de cepillo, lávelo apropiadamente y elimine inmediatamente cualquier material adherido. Recomendamos la limpieza ultrasonica, pero si usa una solución de limpieza, use un detergente o solución de pH neutro. Use a una concentración apropiada. Utilice lo de acuerdo con el manual de instrucciones para la solución de limpieza. Después de lavar, enjuague la solución con suficiente agua corriente y séquelo inmediatamente para evitar la corrosión. Después de limpiar, se realiza la esterilización por vapor a 121°C durante 15 minutos. La esterilización debe llevarse a cabo de conformidad con las instrucciones del fabricante para el uso del esterilizador. Asegúrese de que no haya daños, grietas, arañazos, descoloramiento, u otras anomalías después de la limpieza y esterilización.
- Limpie los Dispensing Stand utilizados con agentes de uso común y desinfectelos de acuerdo con las normas higiénicas de uso común.

5. Almacenamiento

- Condiciones de almacenamiento**
① Almacene los componentes de Super-Bond Brush-dip Starter Kit en una temperatura ambiente de 1 a 30°C en un lugar oscuro. Las altas temperaturas, la alta humedad y la luz solar directa pueden acortar su vida útil.
② No utilice este producto después de la fecha de vencimiento. Vea el paquete exterior para la fecha de vencimiento.

- Vida útil del producto**
La vida útil del producto se puede acortar dependiendo de las circunstancias de uso. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de su uso.

6. Eliminación

6.1 Eliminación del Super-Bond Brush-dip Initiator

- Eliminación del contenido del Super-Bond Brush-dip Initiator**
① Prepare un envase (vidrio, plástico, metal, etc.) para su eliminación (evite utilizar envases de papel).
② Llene el envase con una solución de etanol ajustada a una concentración de etanol de al menos 50 % en volumen.
③ El volumen de solución requerido es 100 ml de solución de etanol por Super-Bond Brush-dip Initiator (0,7 ml).
④ Suelte el Super-Bond Brush-dip Initiator residual en la solución de etanol preparada hasta que el tornillo deje de girar. Deje la solución de etanol en la que se ha soltado el Super-Bond Brush-dip Initiator durante al menos 24 horas.

⑤ Deseche la solución de etanol que contiene el Super-Bond Brush-dip Initiator en conforme a las regulaciones locales.

- Eliminación de la jeringa vacía del Super-Bond Brush-dip Initiator**
① Retire la tapa de la jeringa y remoje la jeringa vacía de Super-Bond Brush-dip Initiator en agua 24 horas o más. Desechélo conforme a las regulaciones locales.

6.2 Eliminación de componentes excepto el Super-Bond Brush-dip Initiator

- Deseche el contenido, los envases o el envoltorio, excepto el Super-Bond Brush-dip Initiator, conforme a las regulaciones locales para evitar daños al medio ambiente.

Como en cualquier tratamiento dental, la constitución individual del paciente y el requisito único del caso clínico deben ser considerados antes de seleccionar materiales y condiciones para el uso.

7. Cómo usar

- 7.1 Preparación de la superficie**
Es esencial que todas las superficies a unir con Super-Bond Brush-dip Starter Kit estén preparadas apropiadamente. El método de preparación puede variar según la naturaleza de los materiales.

1) Superficie del diente

- Limpieza
Limpie todas las superficies a unir siguiendo el procedimiento habitual. Si es necesario, limpie todas las superficies usando una copa / cepillo de pulido con piedra pómez sin aceite ni fluoruro. Enjuague bien y seque. Se recomienda el aislamiento con dique de goma o dique de algodón.
- Aplicación de Enamel Etchant Gel
① Retire la tapa (roja) de la jeringuilla girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Guarde la tapa de la jeringuilla.
② Coloque con seguridad Needle Tip en la jeringa y asegúrese que la jeringa esté bien sellada.
③ Aplique el producto directamente en la superficie del diente.
Nota: Consulte la Tabla 1 para el tiempo de aplicación.
Aplique lentamente la presión sobre el émbolo de la jeringuilla. Favor de empujar el émbolo suavemente. El gel puede salirpor alrededor cuando se aplica una presión fuerte y rápida.
④ Deseche Needle Tip apropiadamente después de usar y selle el envase inmediatamente con la tapa de la jeringa para evitar que se seque el material. No almacene la jeringa con Needle Tip puesto en su lugar. Almacénelo solo con la tapa de la jeringa.

Nota: Al aplicar los Geles directamente a la superficie del diente, cubra toda la jeringuilla con una barrera desechable (p. ej. un film plástico) para prevenir contaminación por saliva o sangre. Desinfecte la jeringuilla irlandesa con una gasa absorbente saturada con desinfectante antes de cubrir y después de su uso.

Nota: Al aplicar los Geles directamente a la superficie del diente, cubra toda la jeringuilla con una barrera desechable (p. ej. un film plástico) para prevenir contaminación por saliva o sangre. Desinfecte la jeringuilla irlandesa con una gasa absorbente saturada con desinfectante antes de cubrir y después de su uso.

Tabla 1 Tiempo de aplicación	
Enamel Etchant Gel	
Esmalte	30 seg.

2) Superficie compuesta de metal, cerámica, circonio y resina

- Limpieza y acondicionamiento
Limpie todas las superficies a unir siguiendo el procedimiento habitual. Haga el tratamiento provisional y acondicione la superficie a ser unida, siguiendo las instrucciones específicas de cada material protésico y producto. Raspe la superficie con fresa de diamante o chorro dental si es necesario.

Nota: La aplicación de Enamel Etchant Gel ayudará a eliminar contaminantes superficiales, y el Impiator ultrasonico también es eficaz.

- Aplicación de imprimación
Prepare la pretesis si así lo indican las instrucciones del fabricante . Recomendamos el uso de agentes de imprimación para prótesis dental fabricados por Sun Medical Co., Ltd.

7.2 Técnica de Brush-dip (Cepillo)

Casos clínicos recomendados:
① Aplicación directa de dientes flojos, soportes de ortodoncia de unión, puente de unión directa, reparación de prótesis fracturadas, etc.

Nota: Para diversos tipos de preparaciones de superficie, favor de consultar el apartado anterior "7.1 Preparación de la superficie".

1) Dispensar Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear)

Coloque dos tazas Dispensing Cups en el plato Dispensing Stand. Vierta una cantidad apropiada de Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear) en una de las tazas. Apliane la parte superior del Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear) vertido en la taza golpeando suavemente el costado del plato Dispensing Stand con los dedos o golpeando la mesa por la parte inferior del Dispensing Stand.

2) Preparación de Líquido Activado

Sostenga la botella de Super-Bond Brush-dip Monomer perpendicular a la taza y vierta el número apropiado de gotas en la taza. Sostenga la jeringa de Super-Bond Brush-dip Initiator perpendicular a la taza y vierta el número adecuado de gotas en el monómero, girando el tornillo. Remueva suavemente con el Brush Tip. Esta mezcla se llama "Líquido Activado". El Líquido Activado se desactiva gradualmente. Úselo en menos de 5 minutos después de la mezcla.

[Proporción de Mezcla para Líquido Activado]		
Líquido Activado		
Super-Bond Brush-dip Monomer	Super-Bond Brush-dip Initiator	
4 gotas	1 gota	
8 gotas	2 gotas	

- Aplicación del cemento Super-Bond Brush-dip Starter Kit (resina)**
Coloque Brush Tip en Brush Handle. Moje Brush Tip con el Activated Liquid, luego toque la Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear) en la taza ligeramente con la punta del cepillo. Una pequeña bola de Super-Bond Polymer (Brush-dip Clear) se formará a la punta del cepillo y puede recogerse. Transfiera y aplique la bola de polímero sobre la superficie a unir. Tan pronto como toque la superficie, el polímero se extenderá para formar una capa de cemento cremosa y homogénea. Si es necesario, repita el procedimiento hasta cubrir la superficie entera con la cantidad adecuada de cemento.

Nota: Cuando repite el procedimiento de recoigida, limpie el cepillo con una gasa entre las bolas formadas.

Nota: Aplicar una capa del líquido activado a la superficie antes de colocar la primera capa ayudará a extenderse Super-Bond Brush-dip Starter Kit suavemente.

4) Montaje y acabado

El tiempo de curado varía con la temperatura ambiente. El tiempo de curado estándar a la temperatura de la boca (37°C) es de 5 a 6 minutos. Comience el acabado y pulido después de 6 minutos o más. Confirme si se ha logrado el curado suficiente.

TR

TALIMATLAR

ÖNEMLİ :
KULLANIMADAN ÖNCE TÜM TALIMATLARI OKUYUN.
KULLANIM KILAVUZUNU SAKLAYIN VE PERİYODİK OLARAK OKUYUN.

Dental adhesiv rezin siman

Super-Bond Brush-dip Starter Kit

[SADECE DİŞ HEKİMİ KULLANIMI İÇİNDİR]

- Ürüne Genel Bakış**
Super-Bond Brush-dip Starter Kit self cure adeziv rezin simandır. 4-META*, MMA*, TBB*ve PMMA** (4-META / MMA-TBB rezin) içermektedir. Çok çeşitli materyallerden üretilen tüm sabit protezlerin simantasy