
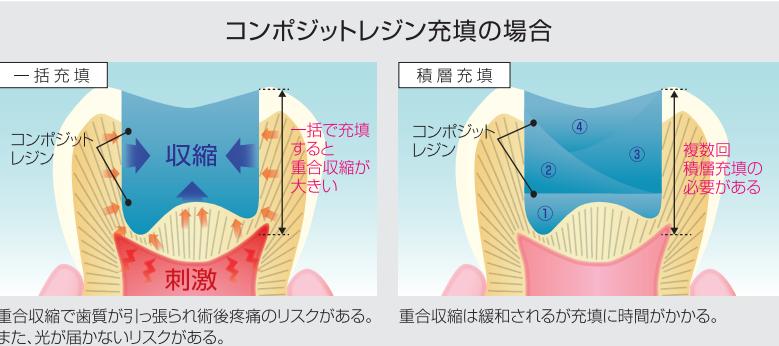


バルク裏層・バルク充填のメリット

<従来の修復では…>

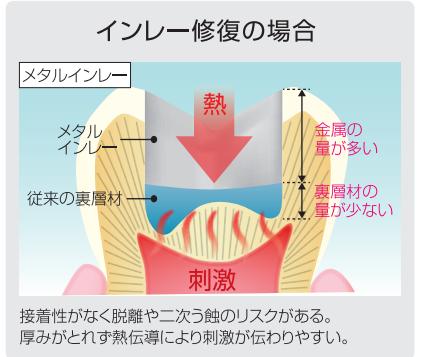


約4mmまで一括充填

深い窩洞に対して、20秒の光照射で4mmまで一括充填できる高い硬化性があるため「バルク裏層」「バルク充填」が可能です。

10秒の光照射でも3mmまで硬化!

機種	硬化深度	照射時間
LED	3mm	10秒
	4mm	20秒

JIS T 6514: 2015準拠

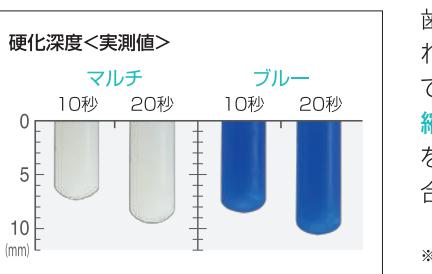


LPSモノマー®で低重合収縮を実現

歯科で一般的に多用されるモノマーと比較して、極めて低い重合収縮率の「LPSモノマー」を採用することで、低重合収縮を実現しました。

*LPS = Low Polymerization Shrinkage (自社試験による)

LPSモノマー®含有で重合収縮によるコントラクションギャップを低減!

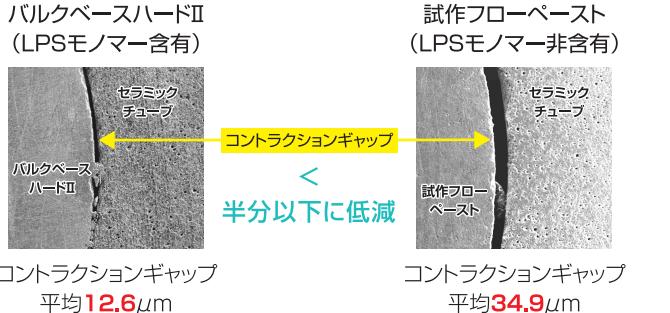

優れた歯質浸透性で高い接着性の『バルクベースライナー®II』

室温保管が可能!


ライナーリキッド™だけでも使える!!



三井化学(株)が新たに開発した「High-PAモノマー™」により接着性がUP!!

優れた接着性および歯質浸透性の「High-PAモノマー™」を採用することで、従来のバルクベースライナーよりも接着性が向上しました。

※High-PA=High permeation & adhesion

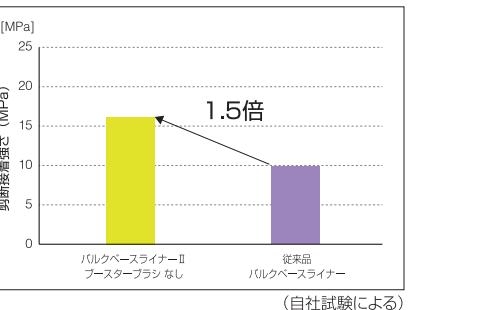

ライナーリキッド™のみで使用する場合

待ち時間
0秒




ブースターブラシ™を併用すると…




デュアルキュア性を発揮!!

新規親水性化重合開始剤を担持したブースターブラシを併用することで、デュアルキュア性を発揮し、さらに接着性が向上します。光が当たりにくい窩洞でも安心してお使いいただけます。

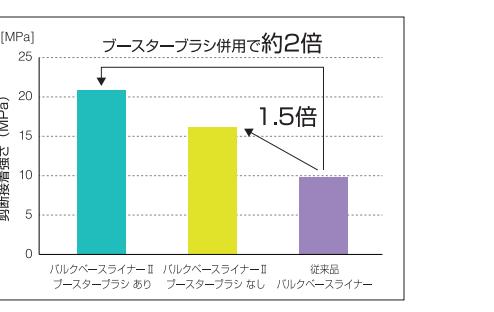

BioactiveMonomer®配合!!

BioactiveMonomerである「C-MET」が象牙細管内液などに含まれるイオン成分を引き寄せるにより、ハイドロキシアパタイト様の結晶を生成します。

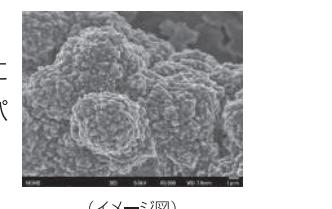

ブースターブラシ™を併用する場合

待ち時間
0秒



臨床例

裏層から最表層まで一括充填



う蝕を除去



バルクベースライナーIIを塗布、エアーフロー後、光照射5秒



バルクベースハードII ミディアムフロー(マルチ)で裏層から最表層まで一括充填、光照射10秒



咬合調整、研磨

ブルーで裏層



う蝕を除去
深い窩洞が存在し、裏層が必要



バルクベースライナーIIを塗布、エアーフロー後、光照射5秒




バルクベースハードII ミディアムフロー(ブルー)で窓底部を裏層、光照射10秒その後、遠心部をローフロー(ブルー)で積層裏層し、光照射10秒




形成後、印象採得

操作ステップ

直接法 バルクベース®ハードIIで一括充填

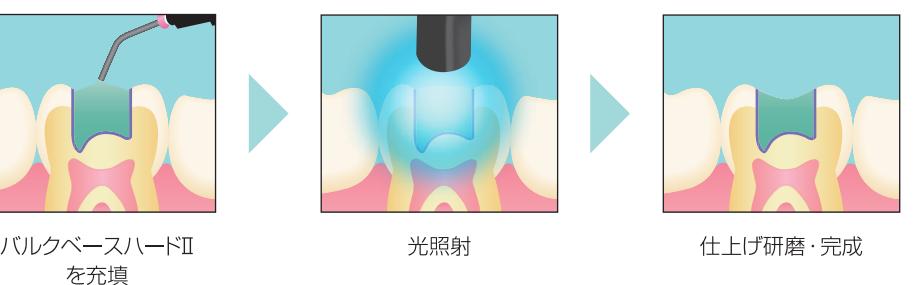

間接法 バルクベース®ハードIIで裏層後、インレー形成

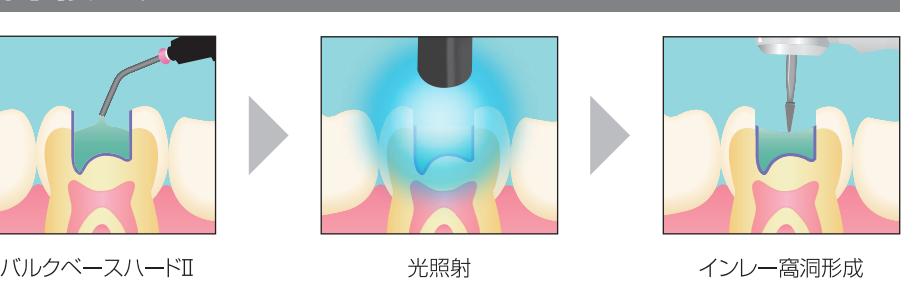



物性値

	バルクベースハードII			当社フロアブルコンポジットレジン	試験方法
	ハイフロー	ミディアムフロー	ローフロー		
重合収縮率 (%)	2.9	2.7	2.9	4.3	ISO 17304: 2013準拠
曲げ強さ (MPa)	120	130	130	115	JIS T 6514:2015 準拠
X線透視性 (%)	200	200	200	200	
摩耗深さ (μm)	6.0	4.9	5.8	8.3	当社フロアブルレジンと比較し、約1.7倍の大容量シリンジ

※1: 対アルミニウム
(自社試験による)

包装・価格



歯科裏層用高分子系材料
バルクベース®ハードII セット
標準価格 ¥19,500

バルクベースハードII ハイフロー(マルチ)
バルクベースハードII ミディアムフロー(マルチ)
バルクベースハードII ローフロー(マルチ)
バルクベースライナーII ライナーリキッド
バルクベースライナーII ブースターブラシ
19Gニードル
1本(2.5mL/4.8g)
1本(2.5mL/4.8g)
1本(2.5mL/4.8g)
1本(3mL)
1ケース(15本)
15本(ニードルキャップ(グレー)3個付き)

単品



歯科裏層用高分子系材料
バルクベース®ハードII
歯科用象牙質接着材
バルクベースライナー®II

Bulk Base HARD II

マルチシェードで歯に馴染む
低重合収縮のバルク裏層充填材



■発売

株式会社モリタ

大阪本社: 〒564-0660 大阪府吹田市東町3-33-18 ☎ 06-6380-2525

東京本社: 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 ☎ 03-3834-6161

お客様相談センター: フリーコール 0800-222-8020 (医療従事者専用)

EM41-01