

取扱説明書

※ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご参照ください。

MPCポリマーコート材
キレイキープ スプレーⅡ

キレイキープ

Spray Ⅱ



ご使用前に

- ティッシュコンディショナーで裏装されている義歯には使用しないでください。エタノール成分により表面が溶解する場合があります。
- 適用面に汚れが付着していると、コーティング効果が得られません。あらかじめ義歯ブラシなどで汚れを除去してください。
- 「キレイキープ スプレーⅡ」をご使用の際には必ず別売の「キレイキープ ライト」を併用してください。

使用方法

コーティング前の準備

義歯清掃



歯石・プラークを除去

エアブロー



強圧でエアブローし、水分をしっかりと取り除く

コーティング処置

塗布(両面)



スプレーⅡを義歯全体に均一に塗布
【目安】全部床義歯：5～6プッシュ

エアブロー(両面)



弱圧で乾くまでエアブロー
(液を吹き飛ばさないように注意)

袋に封入



付属の袋に義歯を封入

セット



義歯をライトの中にセット

UVC照射(表面)



蓋を閉じ、中央のボタンを
押してUVC照射開始
(3分後に自動停止)

UVC照射(裏面)



義歯を袋ごと裏返して
再度UVC照射
(3分後に自動停止)

水洗



義歯を袋から取り出して
軽く水洗し、完了

注意

重ならないように入れること



重なった部分は影となり
照射光が当たらないため、
コーティング効果が得られません

⚠ 照射光を直視しないこと

製品概要

本製品は、義歯、マウスガード、ナイトガード、リテーナーなど口腔内で使用する樹脂製装置への細菌の付着を低減する目的で使用されるMPCポリマーコート材です。

専用のライトでUVC（深紫外線）を照射することでMPCポリマーが光反応し、細菌の付着低減効果を長続きさせます。コーティング膜は無色透明で、約0.5μmと極薄被膜のため、義歯の装着感や舌感に影響を与えません。

禁止：ティッシュコンディショナーで裏装されている義歯には使用しないでください。エタノール成分により表面が溶解する場合があります。

製品構成

【キレイキープ スプレーⅡ】

スプレーⅡ …………… 1本 (30mL)

袋 …………… 100枚

成分：エタノール、水、光反応性MPCポリマー



火気厳禁

危険

【危険有害性情報】

引火性の高い液体及び蒸気
強い眼刺激
呼吸器への刺激のおそれ
眠気又はめまいのおそれ
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
長期にわたる又は反復ばく露による肝臓の障害
長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ
水生生物に有害

別売 【キレイキープ ライト】

本体 …………… 1台

ACアダプター …………… 1個

注意事項

- ・義歯などを口腔内に装着したまま本材を直接塗布しないでください。
- ・表面滑沢剤ではありませんので、艶は出ません。
- ・UVC照射は、必ず専用の「キレイキープ ライト」を使用してください。
- ・使用前に「キレイキープ ライト」の取扱説明書をご確認ください。
- ・「キレイキープ ライト」に義歯などを入れる際は、衛生上の理由から、付属の袋を使用してください。
- ・付属の袋に入れる義歯などは原則一つです。複数の義歯などを入れないでください。
- ・袋は使い捨てです。再使用はできません。
- ・本材の使用により歯肉、粘膜、口唇などに発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれなどの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせてください。
- ・本材またはエタノールに対する過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにしてください。また本材の使用により過敏症状を起こした場合には医師の診断を受けてください。なお、医療用（歯科用）手袋は、本材の直接的接触を防ぎますが、短時間のうちに手袋素材を透過することが知られているため、本材が付着した場合は直ちに手袋を捨て、石鹸を使用して流水で手を十分に洗浄してください。
- ・万一、術者または患者の眼に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けてください。
- ・万一、術者または患者が誤飲した場合は、すぐにうがいをし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・本材はエタノールを含有しています。高濃度の蒸気の吸入を避けるために、十分に換気されている場所で使用してください。万一、術者または患者が高濃度の蒸気を多量に吸入した場合は、新鮮な空気のある場所へ移動してください。また、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・本材は火気、コンセントの近くで使用しないでください。
- ・多湿、直射日光を避け、室温（1℃～30℃）で保管してください。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。
- ・本材は、本体に記載の使用期限までに使用してください。

■資料請求・お問い合わせ先



サンメディカル株式会社 本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎ 077(582)9980

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金 (祝日を除く) 午前9:00～午後5:30 ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>