

スーパーMTAペースト

注意事項

①適用歯面の前処理について

前処理は必要ありません。

②出血している場合

露髄面から出血している場合は、必ず止血をしてから適用してください。

③適用歯面の乾燥について

適用歯面は乾燥してください。

スーパーMTAペーストはレジン系覆髄材なので、乾燥が不十分だと歯面との馴染みが悪くなる場合があります。

④練和ペーストを塗り広げておく理由

操作時間を確保するためです。

キャタリストVと練和したペーストは徐々に重合が進んで粘度が上昇しますが、空気と触れさせておくことで重合を遅らせることができます。

⑤硬化について

スーパーMTAペーストは化学重合で硬化しますので、光照射は必要ありません。また、水綿球による水分の補給も必要ありません。

ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。

歯科用覆髄材料 スーパーMTAペースト（管理医療機器） 医療機器認証番号 230AKBZX00064000

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社 本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金（祝日を除く）午前9:00～午後5:30 ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>

スーパーMTAペースト 操作ステップ


練和方法

押し出しすぎ注意!



1目盛り=1回分


1目盛り分のペーストを付属の练和紙にゆっくり押し出す

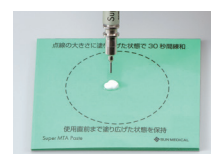

採取したペーストの上にキャタリストVを1滴滴下



点線の大きさに塗り広げながら30秒間練和

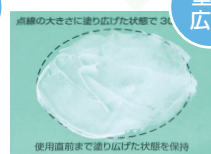

使用直前まで塗り広げた状態で置く（最大3分間）


⚠注意⚠



金属製のスパチュラは使用しない



小さな範囲で素早く練和しない

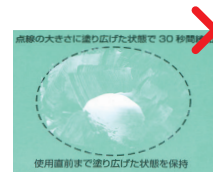

練和後のペーストは集めない

Super MTA Paste


塗り広げ

30秒


スーパーMTAペースト 操作ステップ

移送方法

専用のノズルを使用して移送

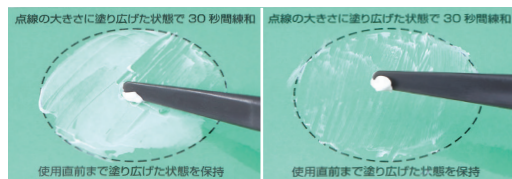

塗り広げたペーストをスパチュラの先端で集める

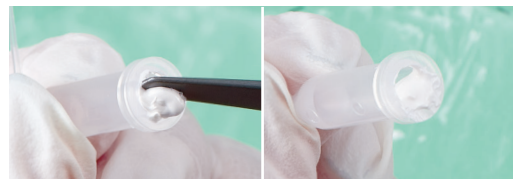

スパチュラでノズルに填入



プラグを挿入




C-Rシリンジに装着




装着後はすみやかに適用部位へ移送

インストルメントにて移送

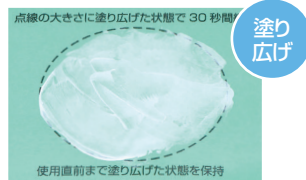

塗り広げた状態で使用する
使用中のペーストは集めない!

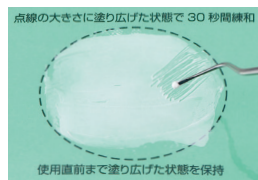

塗り広げたペーストを必要量のみ採取



適用部位に移送

ノズルに使用できるシリンジ

下記に示したCentrix社製のC-Rシリンジ(製造販売元: 株モリタ)が使用可能です。



マークI



マークII



マークIII E-Z



マークIII スナップフィットレギュラー

操作方法の動画が
ご覧いただけます!

こちらのQRコードより
アクセスしてください。

